

GLUMA®

2Bond



GLUMA® 2Bond

Una fuerte unión de por vida.

GLUMA® 2Bond es un moderno sistema adhesivo de 5ª generación de Kulzer adecuado para todo tipo de restauración. Gracias a su innovador sistema basado en nanorelentos, GLUMA® 2Bond no sólo cuenta con una gran fuerza de adhesión tanto en esmalte como en dentina, sino también garantiza una adaptación marginal óptima. Además, contiene el agente desensibilizante GLUMA®, lo que lo hace ideal para desensibilizar áreas hipersensibles.

Este agente de unión monocomponente de 2 pasos (Etch & Rinse) se distingue por su:

- » Manejo sencillo, seguro y con excelente rendimiento
- » Solo una capa para acondicionar, adherir y desensibilizar
- » Efecto desensibilizante
- » Consistencia perfecta

Salud bucal en las mejores manos.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP




GLUMA® 2Bond – Una capa para acondicionar, adherir y desensibilizar.

El manejo de GLUMA® 2Bond es sencillo y fácil, no hay necesidad de mezclar, lo que permite ahorrar tiempo. A diferencia de lo que sucede con los productos de algunos de sus competidores, GLUMA® 2Bond se aplica en un solo paso, después de grabar con GLUMA® Etch 35 Gel, solo se debe aplicar una capa de GLUMA® 2Bond. Resulta fácil obtener una superficie brillante, prueba de una fusión eficaz del adhesivo y la superficie del diente, mediante el secado con aire. En este paso GLUMA® 2Bond no se desprende de la superficie, gracias a su viscosidad que produce una capa adhesiva homogénea sobre la dentina y el esmalte.


Indicaciones para GLUMA® 2Bond

- Adhesión de restauraciones fotocuradas directas de composite y compómero.
- Adhesión de restauraciones indirectas elaboradas en cerámica y composite de laboratorio (incrustaciones, onlays, carillas y coronas).
- Tratamiento de áreas hipersensibles.

Aplicación paso a paso

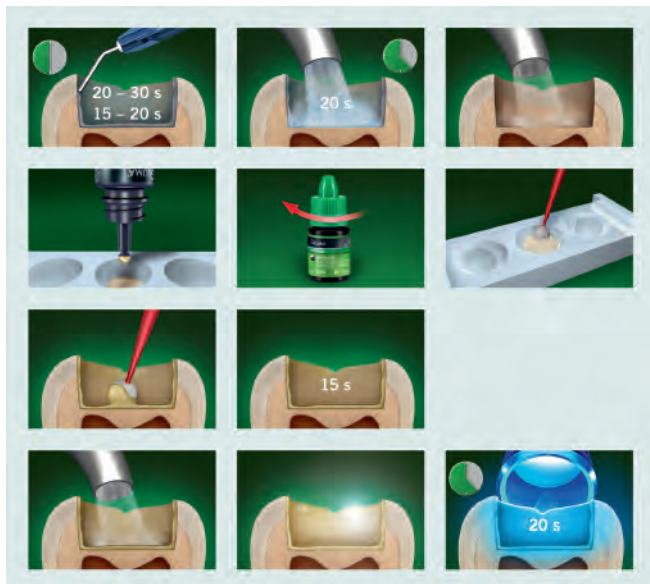

Resistencia al cizallamiento - Materiales de la competencia

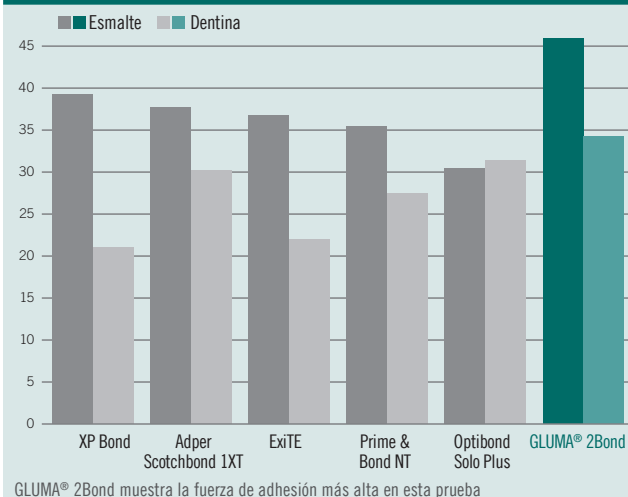

Fuente: Kulzer GmbH, R&D Bondings, Wehrheim, Alemania.

GLUMA® Etch 35 Gel

GLUMA® Etch Gel es un agente de grabado a base de ácido ortofosfórico. Se utiliza para grabar el esmalte y acondicionar la dentina en el contexto de la terapia adhesiva.

GLUMA® Etch Gel se utiliza para el grabado del esmalte o el grabado del esmalte / dentina utilizando la técnica de grabado total o selectivo antes de la fijación adhesiva de:

- Restauraciones de composite y compómero
- Restauraciones indirectas, fabricadas en laboratorio (incrustaciones, coronas, puentes, carillas)
- Selladores



Código:	Artículo:	Contenido:
66000130	GLUMA® Etch 35 Gel	2x2.5ml GLUMA Etch 35 Gel, 25 cánulas
66040972	GLUMA® 2Bond Bottle Refill	1x4ml GLUMA® 2Bond, 50 aplicadores
66040973	GLUMA® 2Bond Bottle Assortment	1x4ml GLUMA® 2Bond, 50 aplicadores 2x2.5ml GLUMA Etch 35 Gel, 25 cánulas

Kulzer México S.A. de C.V.
Tel. (55) 5531-5549
Homero 527 int. 301-302
Polanco Reforma, Miguel Hidalgo
CP 11550, Ciudad de México

web: kulzer.mx
twitter: @kulzermexico
facebook: KulzerMexico
youtube: Kulzer Latinoamérica
contacto-hkx@kulzer-dental.com