



Dientes Pala® Premium y Mondial

La copia perfecta de la naturaleza - Tecnología de punta.

Si de dientes anteriores o posteriores se trata, con las líneas de Kulzer usted obtiene dientes artificiales de la más alta calidad. Cada diente de cada una de nuestras líneas es fabricado y terminado en nuestra planta en Wasserburg, Alemania, bajo el moderno procedimiento INCOMP (inyección / compresión), garantizando así máxima densidad con una ausencia absoluta de bolsas de aire y porosidades. Para el diseño y la fabricación de nuestras líneas "Premium" y "Mondial", así como para la elaboración de los moldes, se emplean métodos computarizados (CAD / CAM).

Salud bucal en las mejores manos.




KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Premium y Mondial – Tecnología de punta

La estratificación: 3-D Multilayering®.


Mediante la inyección de varias masas en forma tridimensional, se logran dientes con una zona incisal opalescente, un núcleo de dentina translúcido y una zona cervical opaca. Materiales de relleno fluorescentes confieren a los dientes Premium y Mondial un aspecto natural.

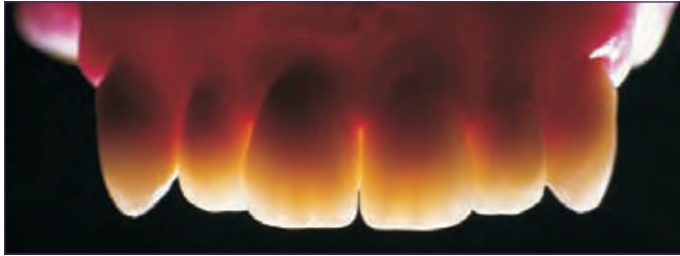

NanoPearls® máxima resistencia a la abrasión y las fracturas.

El material NanoPearls® está formado por un exclusivo relleno híbrido combinado con una matriz elástica y resistente.


“Premium” y “Mondial” son dientes con una resistencia a la abrasión elevada, una superficie extremadamente lisa y opalencia natural. Los materiales utilizados en su fabricación les otorgan una estabilidad de color a largo plazo.

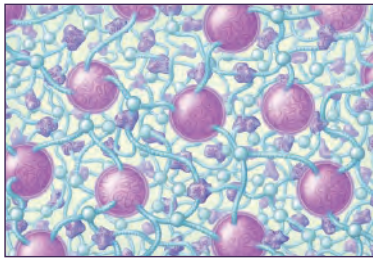

- Relleno orgánico con zona de difusión hacia la matriz.
- Nanorrelleno silanizado en una matriz elástica y resistente.
- Matriz elástica y resistente altamente reticulada.

Estudios de abrasión independientes de la Universidad de Heidelberg y de la de Charité de Berlín, demostraron que la resistencia a la abrasión del nuevo material dental NanoPearls® es un 50% más elevada en comparación con materiales PMMA convencionales.

El resultado: una vida útil considerablemente más larga y pacientes mucho más contentos.

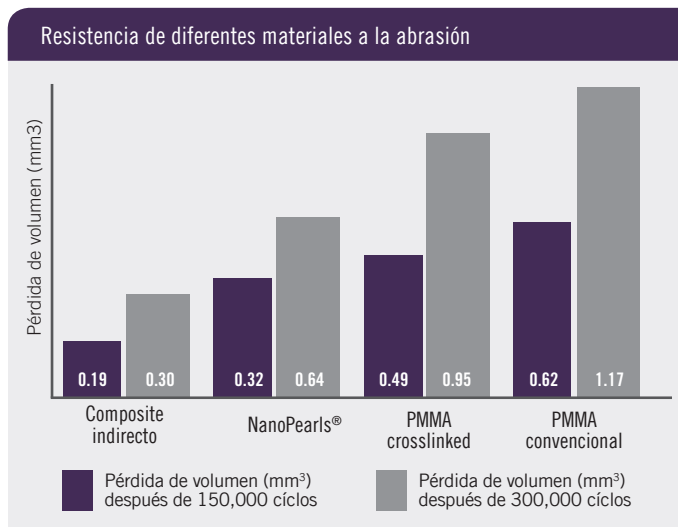

Características de los dientes Premium

- Una base más amplia, mayor utilización de la longitud y profundidad del diente mediante un volumen más grande.
- Las superficies palatinas menos cóncavas implican una menor fuerza lateral y una mayor estabilidad.
- Las superficies proximales más amplias permiten un cierre proximal óptimo y una mejor estética.
- Los caninos redondeados ofrecen un resultado natural a los pacientes.




Modelo multifuncional con Pala Premium 8 en mordidas eugnáticas y disgnáticas de la mandíbula con las oclusiones siguientes:

- A Oclusión diente a diente
- B Oclusión diente a dos dientes
- C Combinada



Anteriores Premium 6

- A Zona cervical variable
- B Base ancha del diente
- C Superficie labial natural
- D Estratificación que simula el diente natural
- E Multicapas 3D
- F Superficie labial perfilada de forma natural

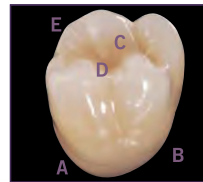


Posteriores Premium 8

- A Zona cervical variable
- B Base ancha del diente
- C El diseño de la cara oclusal permite un montaje lingualizado y equilibrado
- D Dimensiones oclusales igual a un diente natural
- E Reserva para ajustes de oclusión en la zona del esmalte

Premium 8: El “especialista” para casos de implantes y removibles.

Los dientes posteriores Premium 8 tienen exactamente el mismo ancho que los dientes naturales. Gracias a su gran volumen, implantes y aditamentos se pueden integrar fácilmente, hasta en premolares.

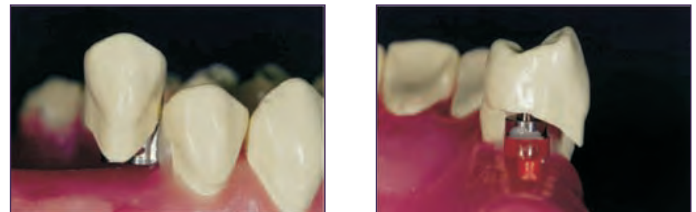

Indicaciones para dientes PALA®.

	Implantes	Removibles	Dentaduras
Premium 6	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Premium 8	★★★★★	★★★★★	★★★
Mondial 8	★★★	★★★★★	★★★★★

Premium 6 – Anteriores

O 2

42,9
9,6
8,1

O 4

46,0
10,7
8,7

O 6

50,6
12,0
9,6

R 2

41,2
10,9
7,6

R 4

44,7
12,0
8,3

R 6

48,8
12,6
9,0

S 2

44,9
9,7
8,3

S 4

46,9
10,5
8,6

S 6

51,0
11,2
9,4

T 2

44,3
9,8
8,1

T 4

46,2
10,6
8,5

T 6

47,1
11,7
8,6

L 12

33,3
8,5
5,2

L 14

34,5
8,6
5,1

L 16

35,8
10,8
5,5

L 18


37,9
10,6
5,7

L 20

38,7
11,9
6,0

L 22

39,4
11,4
5,9

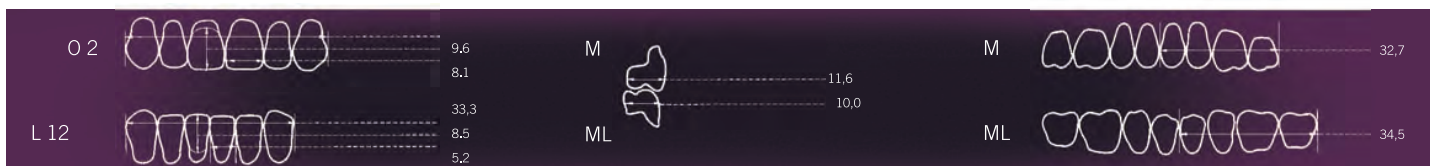

Premium 8 – Posteriores

XS		30,6 10,6
XSL		31,7 8,9
S		31,2 10,8
SL		32,9 9,4
M		32,7 11,6
ML		34,5 10,0
L		34,2 12,0
LL		36,1 10,5

Mondial 8 – Posteriores

29		27,2 8,5
31		28,8 9,2
33		30,8 9,9
35		32,8 10,5
37		35,1 11,0

Formas y posibles combinaciones

	Anteriores superiores	Anteriores inferiores	Posteriores Premium	Posteriores Mondial
Rectangular	R 2 R 4 R 6	L 12 L 14 / L 16 L 18	XS / XSL + S / SL S / SL + M / ML M / ML + L / LL	31 / 33 33 / 35 35 / 37
Cuadrado	S 2 S 4 S 6	L 14 / L 16 L 18 L 20 / L 22	XS / XSL + S / SL M / ML L / LL	31 / 33 33 / 35 37
Triangular	T 2 T 4 T 6	L 14 L 16 L 18	XS / XSL + S / SL S / SL + M / ML L / LL	31 / 33 33 / 35 35
Ovalado	O 2 O 4 O 6	L 12 / L 14 L 16 / L 18 L 20 / L 22	XS / XSL + S / SL S / SL + M / ML L / LL	31 / 33 35 37

Premium y Mondial están disponibles en 7 colores
A1 / A2 / A3 / A3.5 / B1 / B2 / C2

Los dientes Kulzer cumplen con las normas en ISO 22112:2006 y ANSI/ADA No. 15-1999.

Ref: KMX1739 - Pala® es una marca registrada de Kulzer GmbH. Publicidad dirigida exclusivamente a profesionistas del ramo odontológico. Aviso Cofepris NO REQUERIDO.

Kulzer México S.A. de C.V.
Tel. (55) 5531-5549
Homero 527 int. 301-302
Polanco Reforma, Miguel Hidalgo
CP 11550, Ciudad de México

web: kulzer.mx
twitter: @kulzermexico
facebook: KulzerMexico
youtube: Kulzer Latinoamérica
contacto-hkxm@kulzer-dental.com