



xantALGIN®

Cultivado en la naturaleza – procesado con experiencia

Salud bucal en las mejores manos.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Xantalgin® - Los alginatos con materias primas de la naturaleza.

Como base de nuestros alginatos elegimos algas de alta calidad de áreas geográficas seleccionadas. Xantalgin® tiene una larga vida útil sin necesidad de agentes conservadores. Debido a que no contienen desinfectantes químicos son muy amigables con la piel y las encías. Además, el fino aroma a menta hace la toma de impresión más agradable para el paciente.

Xantalgin® está indicado sobre todo para la elaboración de modelos de documentación, análisis y planificación, además de modelos de antagonistas y modelos de trabajo. Xantalgin® ofrece una alta precisión de detalle, excelentes propiedades elásticas así como una elevada resistencia a la tensión. Su mezclado resulta muy fácil, no suelta polvo y es compatible con cualquier tipo de yeso dental.

Xantalgin®

Xantalgin® Select


- La consistencia cremosa de la mezcla es especialmente cómoda para pacientes sensibles.
- Debido a su alta resistencia a la tensión y su elasticidad, las impresiones pueden ser retiradas aún si existen socavados o áreas ligeramente retentivas sin ningún problema.
- El tiempo de fraguado corto es conveniente y ahorra tiempo.

Xantalgin® Crono

- El cambio de color indica la fase del fraguado.
- Gracias a la química optimizada de Xantalgin® Crono, los modelos se pueden correr durante un lapso de 5 días.



Cambio de color según la fase de fraguado de Xantalgin® Crono

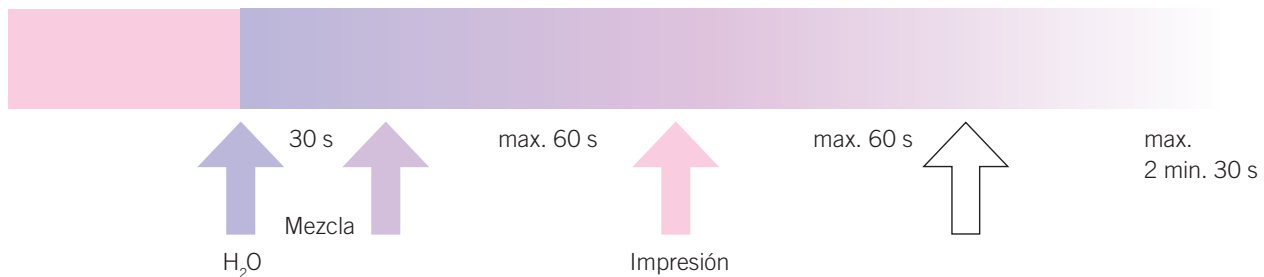

	Xantalgin® Crono	Xantalgin® Select
Tipo de fraguado	Rápido	Rápido
Consistencia	Cremosa	Cremosa
Tiempo de trabajo	1:15 min	1:00 min
Tiempo de fraguado intraoral	1:00 min	1:00 min
Tiempo de fraguado	2:15 min	2:00 min
Porción de mezcla (polvo : agua)	23 g : 50 m	21 g : 50 m
Sabor	Menta	Menta

Diferentes tipos de alginatos

Código:	Artículo:	Contenido:
66002443	XantALGIN® Select SH	1 x 500g
66005221A	XantALGIN® Crono	1 x 500g

Kulzer México S.A. de C.V.
 Tel. (55) 5531-5549
 Homero 527 int. 301-302
 Polanco Reforma, Miguel Hidalgo
 CP 11550, Ciudad de México

web: kulzer.mx
 twitter: @kulzermexico
 facebook: KulzerMexico
 youtube: Kulzer Latinoamérica
 contacto-hkmx@kulzer-dental.com